

## Aqua-Gel Opatrunek hydrożelowy krążek 5 cm



nasza cena: 5,10 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	KIK GEL-KIK MIROSLAW UJAZD ŚL.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

### Opis produktu

Aqua Gel Opatrunek Hydrożelowy, krążek 5cm, 1 szt

#### Wskazania:

Leczenie ran przewlekłych, ostrych i trudno się gojących  
Owrzodzenia  
Oparzenia  
Odleżyny

#### Opis produktu:

Aqua Gel Opatrunek Hydrożelowy, krążek 5cm, jest przezroczysty, sterylny oraz utrzymuje wilgotne środowisko na ranie i wspiera autolityczne oczyszczanie jej z martwych tkanek. W strukturze hydrożelu zatrzymuje się wydzielina wraz z mikroorganizmami, ponadto nie przywiera do rany oraz blokuje zakażenia z zewnątrz, lecz przepuszczając tlen. Aqua Gel Opatrunek Hydrożelowy, krążek jest wytrzymały, miękki i elastyczny. Koi i niweluje uczucie bólu oraz nie powoduje uczulenia ani alergii.

#### Czy wiesz, że?

Aqua Gel Opatrunek Hydrożelowy, krążek 5cm zawiera ponad 90% wody.

#### Opakowanie zawiera:

Aqua Gel Opatrunek Hydrożelowy, krążek 5cm- 1 sztuka

#### Sposób użycia:

Dorośli i dzieci

Należy rozerwać torebkę i wyjąć z niej foremkę z opatrunkiem. Następnie trzymając za cienką folię i materiał włókninowy, trzeba wyjąć

hydrożel z foremki i zdjąć z niego cienką folię, która przykrywa opatrunek. Zamocować go przy pomocy przylepca włókninowego, bandaża czy folii poliuretanowej.

Opatrunek trzeba zmieniać w zależności od rany co 24-72 godziny.

**Środki ostrożności:**

- Rany powinny być poddawane regularnej kontroli
- Produkt jednorazowego użytku
- Produkt do użytku zewnętrznego

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie stosowania leku niezbędna jest konsultacja z lekarzem bądź farmaceutą. Powyższy opis nie stanowi ulotki dołączonej do leku, z którą należy zapoznać się przed zastosowaniem preparatu.